

STEG 1. FÖRBERED YOYOCARE





- ▶ Läs först **Viktiga råd** på sidan 1 och **Villkor och regler för säker användning** på sidorna 24-25 i YOYOcare Användarhandbok.

- ▶ SIM-kortets PIN-kod måste vara avaktiverat annars fungerar inte YOYOcare. Är PIN-koden aktiverad då avaktiveras den med hjälp av en vanlig mobiltelefon. Se mobiltelefonens användardokumentation om du är osäker på hur det går till.
- ▶ Se till att batteriet är laddat.
- ▶ Skjut undan batteriluckan på baksidan, ta ur batteriet, öppna SIM-kortshållaren genom att skjuta metallbygeln åt sidan och vik upp den. Sätt i SIM-kortet och skjut tillbaka bygeln. Sätt tillbaka batteriet och batteriluckan.



STEG 2. STARTA YOYOCARE

- ▶ Tryck och håll ner  knappen tills batteri-indikatorn  blinkar grön: 
- ▶ När GSM-indikatorn  blinkar röd  är enheten färdig att aktiveras.

- ▶ Om  blinkar grön  måste en återställning av enheten göras (se sidan 21 i Användarhandboken).
- ▶ Om  lyser med fast rött sken  indikerar det ett SIM-kortfel. Kontrollera att PIN-koden är avaktiverad (se även Felsökning på sidan 21) och att SIM-kortet lagts i ordentligt.



YOYOcare™

Kom igång snabbt med YOYOcare

www.yoyomotion.com



STEG 3. AKTIVERA YOYOCARE – DEFINIERA "MASTER"


MASTER är den mobiltelefon som administrerar och övervakar YOYOcare.

I nedanstående exempel har MASTER nummer +46701111111 och YOYOcare nummer +46700000000. Notera att YOYOcare har engelska som grundinställning vid uppstart första gången. Därför blir SMS-svaren initialt på engelska.

- ▶ Skicka ett SMS med ordet **MASTER** till YOYOcare.
- ▶ YOYOcare svarar med ett SMS för att bekräfta registreringen. Bekräfta med **JA** eller **YES**.
- ▶ YOYOcare bekräftar att MASTER nu är registrerad.

MASTER har nu tilldelats snabbvalsknappen **1**, och kan kommunicera med YOYOcare och använda alla funktioner.

YOYOcare är nu klar för användning!

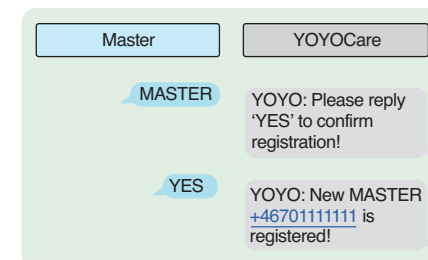

www.yoyomotion.com

TILLVAL

MASTER kan lägga till ytterligare kontaktnummer s.k. ANVÄNDARE och justera tillvalsfunktioner. Se fullständig information i Användarhandbokens sidor 10-20. MASTER kan även ändra fabriksinställningar efter behov. Se Användarhandboken sidorna 12-21 för detaljerade instruktioner, tillval och ändring av inställningar.

Notera att om kontaktnumret till ANVÄNDARE inte är ett mobilnummer kommer endast talsamtal kunna föras mellan YOYOcare och ANVÄNDARE. SMS-kommunikation kommer inte fungera. Se även Snabbguide för MASTER som innehåller vanliga YOYOcare-kommandon.

A. ÄNDRA SPRÅK TILL SVENSKA (GRUNDINSTÄLLNING ÄR ENGELSKA).

- ▶ Skicka LSSV

B. LÄGG TILL KONTAKTNUMMER TILL SNABBVALSKNAPP 2 OCH 3.

- ▶ Skicka U2A+46702222222 för att registrera +46702222222 som kontaktnummer till ANVÄNDARE 2.
- ▶ Skicka U3A+46702222222 för att registrera +46703333333 som kontaktnummer till ANVÄNDARE 3.

C. LÄGG TILL YTTERLIGARE UPP TILL 5 ANVÄNDARE, T EX:

- ▶ Skicka UA+46704444444 för att lägga till nummer +46704444444.

D. LÄGG TILL EN E-POSTADRESS SOM MOTTAGARE AV LARMMEDDELANDEN

Larmmeddelanden, inklusive en kartposition, kan skickas även till en e-postadress (abc@mailserver.se i detta exempel).

- ▶ Skicka UMAabc@mailserver.se

E. LÄGG TILL FASTA ZONER

Användarhandbok sidan 13

F. AKTIVERA EN TILLFÄLLIG ZON S.K. PARKERING

Användarhandbok sidan 11

G. ÄNDRA TIDSZON (GRUNDINSTÄLLNING ÄR CENTRALEUROPEISK TID, GMT+1)

Användarhandbok sidan 18

Svenska

LSSV

YOYO: Systemet uppdaterat

A.

U2A+46702222222

YOYO: Kontakt 2 är +46702222222

U3A+46703333333

YOYO: Kontakt 3 är +46703333333

B.

UA+46704444444

YOYO: Ny användare +46704444444 tillagd

C.

UMAabc@mailserver.se

YOYO: E-mail adress abc@mailserver.se

D.

Engelska

LS*

YOYO: System is updated

A.

U2A+46702222222

YOYO: User 2 is +46702222222

U3A+46703333333

YOYO: User 3 is +46703333333

B.

UA+46704444444

YOYO: New user +46704444444 is added

C.

UMAabc@mailserver.se

YOYO: E-mail is abc@mailserver.se

D.

FJÄRRAKTIVERING OCH INSTÄLLNING AV YOYOcare

En tillfällig MASTER kan (även på avstånd) aktivera och ställa in YOYOcare och sedan överlämna MASTER-rollen till dig.

Detta kan vara praktiskt när man vill ha hjälp av någon annan för att komma igång. Följ stegen 1 och 2 ovan, sedan:

- ▶ Registrera din telefon som MASTER enligt beskrivning i Steg 3 ovan.
- ▶ Valj och anpassa tillval enligt önskemål. Se avsnittet om **TILLVAL** ovan.
- ▶ När detta är klart, ändras MASTER-numret från ditt nummer till det önskade nya numret (t ex, registrera +46709999999 som ny MASTER).
 - Skicka MC+46709999999
 - Både det tidigare och det nya MASTER-numret får en SMS-bekräftelse från YOYOcare

Om något går fel i registreringen av nytt mobilnummer till MASTER (t ex att fel nummer skickas) så måste en återställning av enheten göras. Se sidan 21 i Användarhandboken.

Svenska

MC+46709999999





YOYO: Ny MASTER +46709999999 är registerad!

Engelska

MC+46709999999

YOYO: New MASTER +46709999999 is registered!

ATT ANVÄNDA YOYOcare (FÖR BÄRAREN)

- ▶ Starta och stäng av YOYOcare genom att hålla knappen  nedtryckt i 3-5 sekunder.
- ▶ Tryck på knappen **1** för att ringa MASTER, **2** för att ringa ANVÄNDARE 2, **3** för att ringa ANVÄNDARE 3. Tryck knappen  för att avsluta samtalet.
- ▶ Tryck knapparna **1 1 2** i följd för att ringa upp nödnumret 112 till SOS Alarm. Tryck knappen  för att avsluta samtalet.
- ▶ När MASTER eller någon ANVÄNDARE ringer till YOYOcare hörs två toner innan samtalet kopplas upp automatiskt. Automatuppkopplingen kan även stängas av, (se sidan 16 i Användarhandboken).
- ▶ Tryck  för att skicka ett larmmeddelande till MASTER. Meddelandet skickas även till ANVÄNDARE 2 och 3 samt till en e-postadress om dessa har lagts upp.
- ▶ Se Användarhandbok sidorna 8-9 för mer information.

KOMMUNICERA MED YOYOcare (MASTER OCH ANVÄNDARE)

För detaljerad information om hur MASTER och olika ANVÄNDARE kan kommunicera med YOYOcare, se sidorna 10-12 i Användarhandboken.

De vanligaste kommandona för MASTER respektive ANVÄNDARE anges även på de kort, i kreditkortsformat, som finns i förpackningen.